

top.lign professional
«топ.лайн профессионал»



**Пластмасса холодной полимеризации
для временных и постоянных зубных протезов**

bredent

Чем отличается top.lign professional «топ.лайн профессионал»?

Подходит для временных и постоянных изделий

- Допустим для временных и постоянных протезов.
- Сертифицирован как медицинский продукт класса II а.

Высокопрочный и физиологичный

- Превосходные механические значения (прочность на изгиб: около 100 МПа, модуль упругости: около 2600 МПа) позволяют создавать идеальное сочетание необходимой стабильности протеза и физиологической эластичности.
- Вдвойне более прочные мостовидные протезы (по сравнению с временными полимерными изделиями, продаваемыми на рынке).
- Особенно подходит для работ по имплантационному протезированию.

Устойчив к изменению цвета и возникновению зубного налета

- Компактная молекулярная структура материала позволяет полировать его до зеркального блеска и предотвращает отложение зубного налета.
- Благодаря полному «сшиванию» материала уменьшается влагоемкость, не возникает пожелтения или иного изменения цвета.

Превосходно полируется и имеет стабильные кромки

- Отличные полировочные свойства позволяют крайне быстро и просто обрабатывать материал.
- Оптимальная шлифовка благодаря высокой стабильности кромок.

Эстетичный

- Идеальный эстетичный внешний вид благодаря комплексному предложению и полному ассортименту в классических цветах А–D.
- Благодаря молекулярной структуре и применению люминесцентных красок даже монолитно изготовленные протезы имеют весьма естественный вид.
- Возможно эстетичное индивидуальное исполнение с помощью облицовочного композита сrea.lign® «креа.лайн» (сочетающиеся между собой шкалы цветов).

Надежный и эффективный

- Заливка без образования пузырьков.
- Точные результаты.
- Безззорное соединение с облицовочными оболочками и цельными зубами без необходимости дополнительного химического бондинга.



Показания

Временное протезирование

Мосты, подвергающиеся немедленной нагрузке, на имплантатах или естественных зубах; материал подходит даже для временных конструкций, которые рассчитаны на длительный срок (срок службы > 6 месяцев)

- Несъемные и условно-съемные
- С облицовочными оболочками и без
- С поддержкой каркаса и без

Подлежащий немедленной нагрузке мост на имплантатах



Подлежащий немедленной нагрузке мост, монолитно изготовленный из top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Изображения: МЗТ Себастиан Шульдес (ZTM Sebastian Schuldes), Айзенах, Германия



Отлитый протез



Протез в полости рта пациента

Временный протез на естественных зубах



Мост из top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Изображения: ЗТ Андреа Фоски (ZT Andrea Foschi), Равенна, Италия



Начальные условия



Протез в полости рта пациента

Постоянное протезирование

Протезы на имплантатах

- Условно-съемные и съемные (например, балочные протезы)
- С облицовочными оболочками, цельными зубами или crea.lign «креа.лайн»
- С поддержкой каркаса

Частичные и полные протезы

- Телескопические протезы
- Отливка кламмерной модели

Постоянный протез на имплантатах



Мост из top.lign professional «топ.лайн профессионал» и обработанной десны, индивидуализирован с помощью crea.lign «креа.лайн» *Изображения: ЗТ Кристиан Далла Либера (ZT Christian Dalla Libera), Падуа, Италия*



top.lign professional «топ.лайн профессионал» в необработанном виде




Протез в полости рта пациента

Съемный протез



Кламмерный протез из top.lign professional «топ.лайн профессионал» и облицовочных оболочек novo.lign «новолайн»

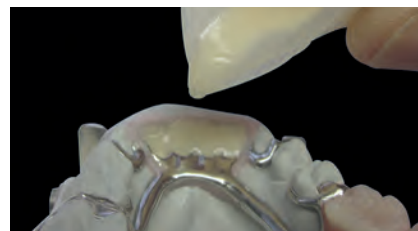

Заливка top.lign professional «топ.лайн профессионал» в предварительную матрицу



Протез на модели

Новый эталон...



Изображения:
ЗТ Антонио Лазетера (Antonio Lazetera), Савона, Италия

...для эффективного изготовления рассчитанных на длительный срок временных конструкций и постоянных зубных протезов в области протезирования на имплантатах

- Подходит для временных и постоянных изделий
- Высокопрочный и физиологичный
- Устойчив к изменению цвета и возникновению зубного налета
- Превосходно полируется и имеет стабильные кромки
- Эстетичный
- Надежный и эффективный

Разновидности изделий top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Полимер top.lign professional «топ.лайн профессионал»



Компактная система со всеми классическими цветами А–D

Цвет колпачка	Материал	Цвета	40 г*	80 г*	200 г*
			№	№	№
—	Шейка зуба 1	—	proCV101		proCV102
—	Шейка зуба 2	—	proCV201		proCV202
—	Эмаль 1	—	proEN101	proEN108	proEN102
—	Эмаль 2	—	proEN201	proEN208	proEN202
—	Прозрачный	—	proTran1		proTran2
—	Осветленный	—	proBL301		proBL302
—	Дентин А1	—	proDA101	proDA108	proDA102
—	Дентин А2	—	proDA201	proDA208	proDA202
—	Дентин А3	—	proDA301	proDA308	proDA302
—	Дентин А3,5	—	proDA351	proDA358	proDA352
—	Дентин А4	—	proDA401	proDA408	proDA402
—	Дентин В1	—	proDB101	proDB108	proDB102
—	Дентин В2	—	proDB201	proDB208	proDB202
—	Дентин В3	—	proDB301	proDB308	proDB302
—	Дентин В4	—	proDB401	proDB408	proDB402
—	Дентин С1	—	proDC101	proDC108	proDC102
—	Дентин С2	—	proDC201	proDC208	proDC202
—	Дентин С3	—	proDC301	proDC308	proDC302
—	Дентин С4	—	proDC401	proDC408	proDC402
—	Дентин D2	—	proDD201	proDD208	proDD202
—	Дентин D3	—	proDD301	proDD308	proDD302
—	Дентин D4	—	proDD401	proDD408	proDD402

*также доступно в наборе

Когда работа должна выполняться быстро...

Просто смешайте 70 % дентина с 30 % эмали и сэкономьте себе целый этап работы.

Мономер top.lign professional «топ.лайн профессионал»




Жидкость top.lign professional
«топ.лайн профессионал»

100 мл, № proLiq01
500 мл, № proLiq05

Совет:

Для эстетичного индивидуального исполнения используйте облицовочный композит **crea.lign®** «креа.лайн» в сочетании с фасетками **novo.lign®** «ново.лайн» из системы **visio.lign®** «визио.лайн».

Еще одно интересное предложение для Вас

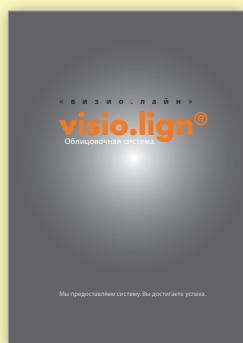

REF 009504 RU

bredent

Обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Германия · Тел.: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Факс: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · @: info@bredent.com

